

Hinweise zum Probenversand

| | |
|---------------------------|---|
| DNA-Diagnostik | 7,5 ml EDTA-Blut von Erwachsenen 5 ml EDTA-Blut von Kleinkindern EDTA-Monovette sofort nach der Entnahme mehrmals schwenken und ungekühlt verschicken |
| LZTR1-/ NF2-Diagnostik | Wenn möglich zusätzlich zur Blutprobe bitte Tumormaterial* mitsenden. <small>* frisch entnommen in Mediumröhrchen - ersatzweise Paraffinmaterial</small> |

Versand von Blut- und Gewebeproben

Es gilt die Versandvorschrift P650 der ADR 2015 für den Transport diagnostischer Proben

Der Primärbehälter (z.B. Blutröhrchen) muss in einer Sekundärverpackung mit einem Aufsaugvlies verpackt sein.

Der Versand erfolgt im Päckchen oder Versandtasche mit den Angaben „Medizinisches Untersuchungsgut“ und UN Nummer/Zeichen UN 3373

(nach DIN EN 829)